




BIOPTRON® 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

Ф И Л Т Р И

Б Ъ Л Г А Р С К И (B G)

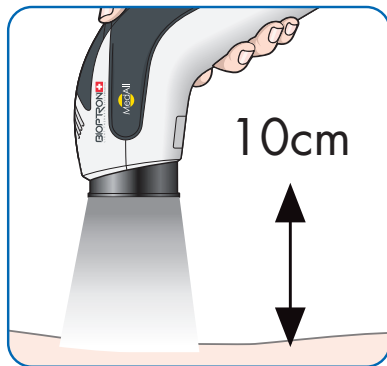

1



2



3



4

НАЧИН НА УПОТРЕБА

На разстояние от 10 см позиционирайте устройството BIOPTRON с желания филтър, за да покриете зоната, която желаете (Фигура 1) да третирате. Когато третирате зони, по-големи от диаметъра на цветния филтър, третирайте ги една по една според препоръчаното време.

КАК ДА СМЕНИМ ФИЛТЪРА?

Внимателно и без сила извадете филтъра (Фигура 2), който трябва да смените и поставете желания цветен филтър, както е показано на Фигура 3. Хванете външния пръстен на филтъра, а не лещата.

КАК ДА ПОЧИСТИМ ФИЛТЪРА? (Фигура 4)

1. Извадете филтъра от устройството, като държите външния пръстен на филтъра.
2. Използвайте мека, мокра кърпа без власинки, за да избегнете надраскване на стъклената повърхност.
3. Подсушете филтъра с друга кърпа без власинки.

ГАРАНЦИЯ

- 5 години, ако се използва по предназначение и ако се спазват предупрежденията
- Тази гаранция покрива материални и производствени дефекти
- Тази гаранция не покрива естетически промени, произтичащи от обикновено износване и разкъсване, които не влияят на производителността на продукта, или щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не използвайте никакви химикали (например изопропилов алкохол) за почистване на вътрешната или външната страна на стъклената повърхност и филтърния пръстен.
2. Съхранявайте филтъра в предпазна торбичка, за да предотвратите натрупването на прах и обезцветяването поради излагане на слънчева светлина.
3. Филтърът е изработен от крехко стъкло, така че с него трябва да се работи внимателно!
4. Потребителят няма право да премахва филтърната леща.



PMD-ME145-22-BG
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

Б Ъ Л Г А Р С К И (В Г)